

Navina Smart – Produktinformationen

Produktbeschreibung

Transanales Irrigationssystem mit elektronischer Kontrolleinheit.

Haltbarkeit und Anwendungen

Alle Komponenten des Navina Irrigationssystems haben eine Haltbarkeit von 3,5 Jahren, mit Ausnahme der Navina Katheter und des Navina Konus, bei denen die Haltbarkeitsdauer 2 Jahre beträgt. Wenn Navina Komponenten in Sets verpackt sind, bestimmt die Komponente mit der kürzesten Haltbarkeitsdauer die Haltbarkeitsdauer des Sets.

Beachten Sie, dass bei der Navina Smart-Kontrolleinheit auch ein „Aufladedatum“ von 1,5 Jahren ab Herstellungsdatum angegeben ist.

Navina Katheter und Konusse sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt, der Wasserbehälter ist für 15 Anwendungen geeignet, das Schlauchset für 100 Anwendungen und die Navina Smart-Kontrolleinheit für 400 Anwendungen bzw. zwei Jahre ab dem Datum der ersten Verwendung.

Materialzusammensetzung

Kathetermaterial: Styrol-Ethylen-Butylen-Styrol (SEBS)/ Polypropylen (PP) mit einer hydrophilen Beschichtung aus Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Primärpackmittel: PE/PET-Beutel.

Sekundärpackmittel: Karton und Wellpappe.

Verwendungszweck

Das Navina System ist für die transanale Irrigation vorgesehen, indem Wasser durch einen Rektalkatheter in den unteren Teil des Dickdarms instilliert wird.

Indikationen

Das Navina System ist für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren indiziert, die an Stuhlinkontinenz, chronischer Verstopfung und/oder unter zeitaufwendigem Darmmanagement leiden. Durch Einleiten von Wasser in den unteren Bereich des Darms können die peristaltischen Muskeln im Darm stimuliert werden und beginnen, den Inhalt von Dickdarm und Rektum zu entleeren..

Kontraindikationen

Wenden Sie Navina Systems in den folgenden Fällen **NICHT** an:

- Bekannte Anal- oder Kolorektalstenose.
- Aktive entzündliche Darmerkrankung.
- Akute Divertikulitis.
- Kolorektaler Krebs.
- Ischämische Kolitis.
- Innerhalb von drei Monaten nach einer analen oder kolorektalen Operation.
- Innerhalb von 4 Wochen nach einer endoskopischen Polypektomie.

Da die Liste der Kontraindikationen möglicherweise nicht vollständig ist, berücksichtigt das Pflegepersonal/ med. Fachpersonal auch stets individuelle Faktoren..



Navina Smart System

Artikelnummer	Typ	Angaben
6900915	Navina Smart-System in der Größe „Regular“	1 Navina Smart-Kontrolleinheit 1 Netzteil 1 Kabel
6901015	Navina Smart-System in der Größe „Small“	1 Wasserbehälter 1 Schlauchset 2 Rektalkatheter
6901915	Navina Smart-System-Konus	1 Navina Tragetasche 1 Zubehörset
6900300	Navina Verbrauchsmaterialien-Set – Regular	1 Wasserbehälter
6900400	Navina Verbrauchsmaterialien-Set in Größe „Small“	15 Rektalkatheter
6901600	Navina Verbrauchsmaterialien-Set Konus	
6894000	Navina Katheter-Set der Größe „Regular“	10 Rektalkatheter
6894300	Navina Katheter-Set in Größe „Small“	
6901100	Navina Schlauchset	1 Katheterschlauch 1 Wasserbehälter-schlauch
6901200	Navina-Zubehör	2 Halteringe (1 vertikal, 1 horizontal) 1 Trageband 1 Positionierungsgurt 1 Navina Smart-Positionierungsklammer
6901415	Navina Smart-Kontrolleinheit	1 Navina Smart-Kontrolleinheit 1 Netzteil 1 Kabel

Navina™ Smart



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.de



Rx Only