

LoFric Elle – weibliche Anwender

LoFric® Elle™ Hydrophiler Blasenkatheter für den Einmalgebrauch, gebrauchsfertig.

Für kurz- und langfristiges Blasenmanagement mit intermittierender Katheterisierung.

LoFric-Katheter sind verschreibungspflichtig.


Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Anwendung die Anweisungen Ihres medizinischen Fachpersonals zur Katheterisierung befolgen und eine entsprechende Schulung erhalten.

Wichtige Informationen und vollständige Anweisungen finden Sie in der Gebrauchsanleitung, die der Verpackung beiliegt.

Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Gebrauchsanleitung

1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife.
2. Öffnen Sie den oberen Deckel, der als sterile Versiegelung dient.
3. Brechen Sie die untere sterile Barriere, indem Sie den (unteren) Behälter festhalten und
 - a) drehen oder biegen Sie vorsichtig den oberen Teil (Abbildung b oder c).
 - d) Halten Sie das Produkt senkrecht und ziehen Sie den Katheter gerade nach oben aus dem Behälter.
4. Entfernen Sie die restliche Flüssigkeit aus dem Behälter (in die Toilette oder das Waschbecken).
5. OPTIONAL: Durch Anbringen des Behälters am oberen Teil kann dieser als Handgriff verwendet werden.
6. Neigen Sie Ihr Becken nach vorne, spreizen Sie die Schamlippen und ziehen Sie diese sanft nach oben. Die Harnröhre befindet sich direkt über der Vaginalöffnung. Führen Sie den Katheter mit der anderen Hand langsam in Ihre Harnröhrenöffnung ein, bis der Urin zu fließen beginnt. Führen Sie ihn noch etwas weiter ein, um sicherzustellen, dass sich beide Katheteraugen in der Blase befinden.
7. Wenn sich der Urinfluss zu einem Tröpfeln verlangsamt, ziehen Sie den Katheter langsam heraus. Falls der Urin wieder zu fließen beginnt, unterbrechen Sie das Herausziehen und warten ab, bis der Urinfluss aufgehört hat, um eine vollständige Blasenentleerung sicherzustellen.
8. Stecken Sie den Katheter wieder in den Behälter. Entsorgen Sie ihn oder nehmen Sie ihn mit, um ihn später zu entsorgen. **Hinweis!** Der Behälter ist recycelbar.

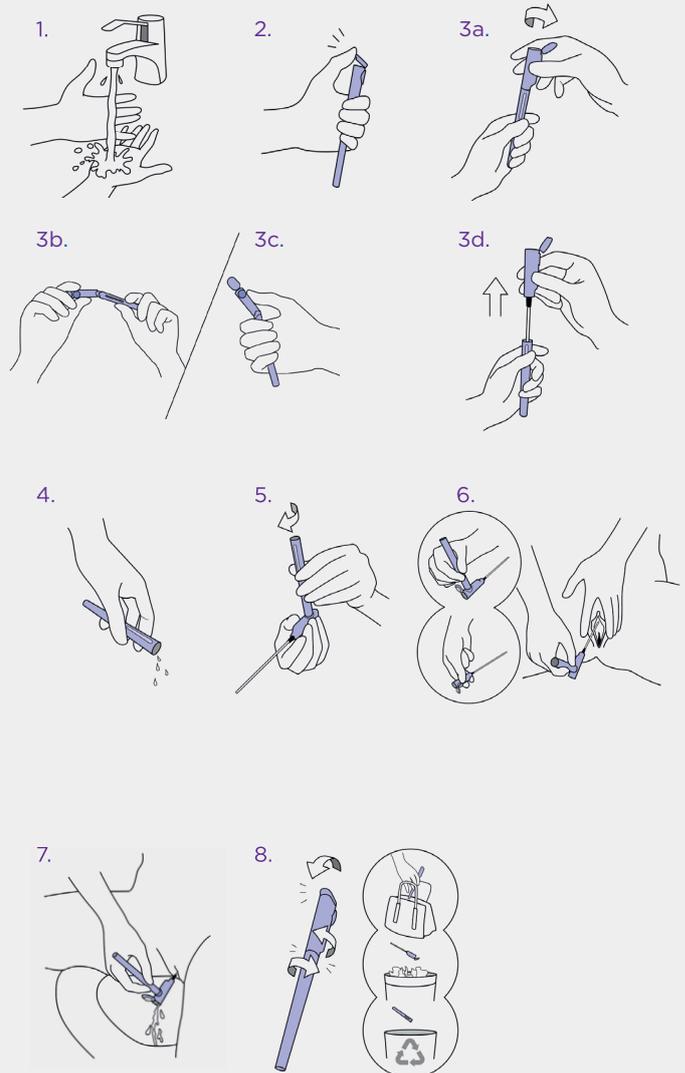

Bei Wellspect entwickeln wir innovative Kontinenzlösungen, die das Leben der Menschen verändern. Wir möchten unsere Anwender dazu inspirieren, Selbstvertrauen und Unabhängigkeit sowie Gesundheit und Wohlbefinden zu entwickeln. Mit unseren Marken LoFric® und Navina™ sind wir seit über 30 Jahren branchenführend. Wir entwickeln zuverlässige und benutzerfreundliche Produkte für das Blasen- und Darmmanagement mit möglichst geringer Umweltbelastung. Wir sind leidenschaftlich bemüht, klimaneutral zu werden und eng mit Anwendern und Angehörigen der Gesundheitsberufe zusammenzuarbeiten, die uns ständig dazu inspirieren, unsere Produkte und Dienstleistungen jetzt und für die Zukunft auf nachhaltige Weise zu verbessern.

Wellspect. Ein echter Unterschied.

Weitere Informationen zu unseren Produkten und unserer Initiative Advancing Continence Care Together (ACCT) finden Sie auf unserer Webseite.

Folgen Sie uns auch auf Facebook und Instagram.

[wellspect.de](https://www.wellspect.de)

[wellspect.at](https://www.wellspect.at)

[wellspect.ch](https://www.wellspect.ch)

