


LoFric Origo Pro

– Kurzanleitung

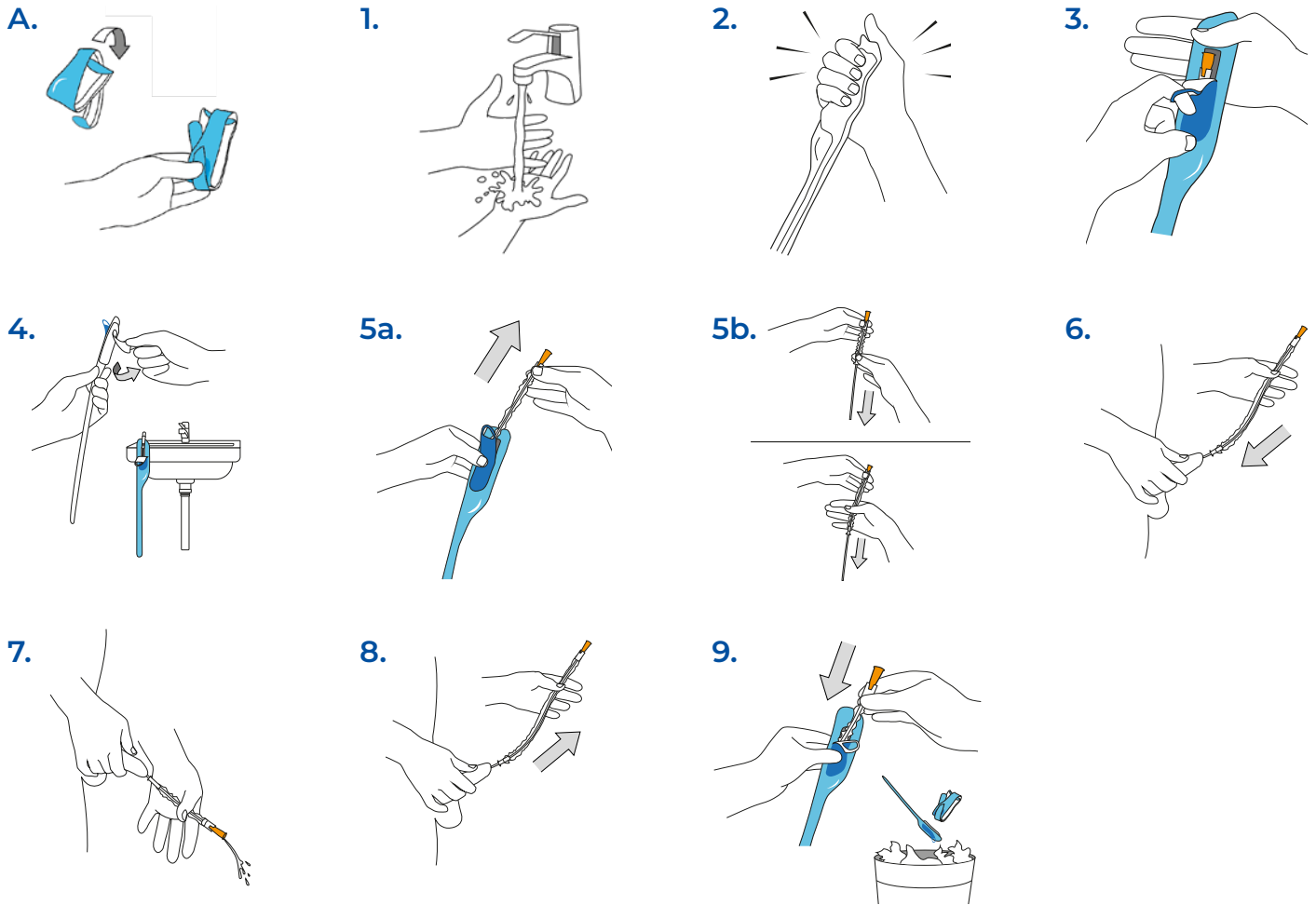

A. Tips Tipps zur Aufbewahrung vor dem Gebrauch. Auf Taschenformat faltbar. Verwenden Sie den vorgesehenen Schlitz, um den Katheter in gefalteter Position zu halten.

1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife.
2. Die Salzlösung durch Drücken freigeben. Der Katheter kann nun verwendet werden.
3. An der Schlaufe nach unten ziehen und öffnen.
4. Optional: Verwenden Sie die Klebefläche auf der Rückseite, um das Produkt auf einer trockenen, sauberen Oberfläche zu befestigen.
5. a. Drücken Sie nach dem Öffnen den Griff der Hülle vorsichtig zusammen und halten Sie ihn fest, um die Schutzhülle beim Herausnehmen des Katheters automatisch nach unten zu ziehen. Verwenden Sie die Schutzhülle, um das Einführen zu kontrollieren, ohne den Katheter berühren zu müssen.

b. Optional: Nehmen Sie den Katheter heraus. Ziehen Sie den Hüllengriff nach unten, um den Katheterschlauch abzudecken. Verwenden Sie die Schutzhülle, um das Einführen zu kontrollieren, ohne den Katheter berühren zu müssen.

6. Heben Sie den Penis in Richtung Bauch an, um die Harnröhre in eine gerade Linie zu bringen. Führen Sie den Katheter vorsichtig in die Harnröhre ein. Sobald Urin zu fließen beginnt, führen Sie den Katheter etwas weiter ein, um einen gleichmäßigen Fluss zu gewährleisten.
7. Richten Sie den Penis nach unten, während der Urin durch den Katheter zu fließen beginnt.
8. Warten Sie, bis der Urinfluss stoppt, um eine vollständige Blasenentleerung sicherzustellen. Ziehen Sie den Katheter langsam heraus.
9. Stecken Sie den Katheter zurück in die Verpackung und entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß (die örtlichen Bestimmungen können variieren).

WICHTIGE INFORMATION

Den Katheter ausschließlich mit der enthaltenen Salzlösung verwenden.

Legen Sie den Katheter nicht auf Papier oder Stoff ab, da diese Materialien die nasse Beschichtung absorbieren können.

Wichtige information

LoFric[®] Origo[™] Pro, einmal-hydrophiler Blasenkatheter, mit Salzlösung zur Aktivierung hydrophil, mit mehreren Katheterraugen, für die vollständige Entleerung der Blase ohne Repositionierung.

Für kurz- und langfristiges Blasenmanagement mit intermittierender Katheterisierung.

Für Erwachsene und Jugendliche.

LoFric-Katheter sind verschreibungspflichtig.

Befolgen Sie vor der Anwendung unbedingt die Anweisungen nach Anleitung zur Katheterisierung durch Ihr medizinisches Fachpersonal.

Wichtige Informationen und vollständige Anweisungen finden Sie in der Gebrauchsanweisung, die der Packung beiliegt.

Wenden Sie sich bei Problemen an Ihren verschreibenden Arzt.

Bei Wellspect entwickeln wir innovative Lösungen für die Kontinenzversorgung, die die Lebensqualität von Menschen mit Blasen- und Darmproblemen verbessern. Wir sind seit über 40 Jahren ein vertrauenswürdiger Marktführer im Gesundheitswesen mit unseren Produktmarken LoFric[®], Navina[™] und Surity[™] und erweitern kontinuierlich den Zugang zu unseren benutzerfreundlichen Lösungen. Wir sind stets bestrebt, die Umweltbelastung unserer Produkte zu minimieren, und setzen uns leidenschaftlich dafür ein, klimaneutral zu werden. Wir arbeiten eng mit Anwendern im Gesundheitswesen und Menschen zusammen, die sich auf unsere Lösungen verlassen, um die klinischen Ergebnisse auf nachhaltige Weise zu verbessern und die Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern.

Wellspect. A Real Difference.

Für weitere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen besuchen Sie bitte unsere Webseite. Tauschen Sie sich mit uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram aus.

wellspect.de

Wellspect GmbH
An der kleinen Seite 8
DE-65604 Elz, Deutschland.
Tel: +49 6431 9869 0.
Kundenservice@wellspect.com

wellspect.at

Wellspect HealthCare GmbH
Wienerbergstraße 11 Turm A/21
1100 Wien, Österreich.
Tel: +43 1 214 61 50-0.
order-at@wellspect.com

wellspect.ch

Wellspect AG
Täferweg 1
5404 Baden-Dättwil, Schweiz
Tel: +41 (0) 800 620 240.
info-ch@wellspect.com

LoFric



Hersteller: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

