

LoFric Origo – männliche Anwender

LoFric® Origo™ Hydrophiler Blasenkatheter für den Einmalgebrauch mit Salzlösung zur Aktivierung.

Für kurz- und langfristiges Blasenmanagement mit intermittierender Katheterisierung.

LoFric-Katheter sind verschreibungspflichtig.

Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Anwendung die Anweisungen Ihres medizinischen Fachpersonals zur Katheterisierung befolgen und eine entsprechende Schulung erhalten.

Wichtige Informationen und vollständige Anweisungen finden Sie in der Gebrauchsanleitung, die der Verpackung beiliegt.

Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich an Ihren Arzt.

A. Tipps zur Aufbewahrung vor dem Gebrauch.


Auf Taschenformat faltbar.

Verwenden Sie den vorgesehenen Schlitz, um den Katheter in gefalteter Position zu halten.



Gebrauchsanleitung

1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife.
2. Drücken Sie das Wasserkissen, um die Salzlösung freizugeben. Der Katheter kann nun verwendet werden.
3. Zum Öffnen die Lasche nach unten ziehen.
4. OPTIONAL: Verwenden Sie die Klebefläche auf der Rückseite, um das Produkt auf einer trockenen, sauberen Oberfläche zu befestigen.
5. Nehmen Sie den Katheter heraus.
OPTIONAL: Mithilfe des beweglichen Einführgriffs am Schlauch können Sie den Katheter einführen, ohne ihn dabei berühren zu müssen.
6. Heben Sie den Penis in Richtung Bauch an, um die Harnröhre in eine gerade Linie zu bringen. Führen Sie den Katheter vorsichtig in die Harnröhre ein. Wenn der Urin zu fließen beginnt, führen Sie den Katheter noch ein kleines bisschen weiter ein, um sicherzustellen, dass sich beide Kathetertippen in der Blase befinden.
7. Richten Sie den Penis nach unten, während der Urin durch den Katheter zu fließen beginnt.
8. Stoppt der Urinfluss, ziehen Sie den Katheter langsam ein kleines Stückchen heraus. Wenn der Urin wieder zu fließen beginnt, warten Sie, bis der Urinfluss aufhört, um eine vollständige Entleerung der Blase sicherzustellen. Danach den Katheter vollständig herausziehen.
9. Stecken Sie den Katheter zurück in die Verpackung und entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß (die örtlichen Bestimmungen können variieren).

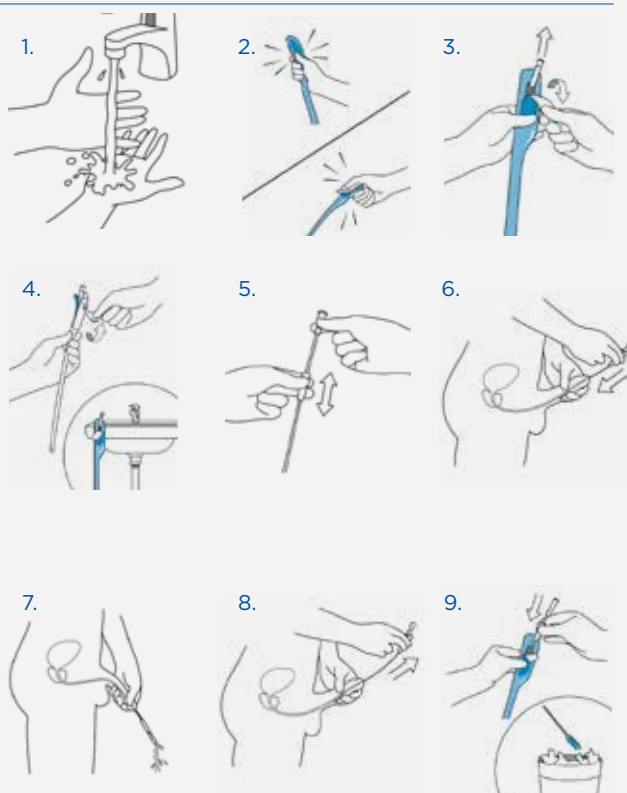

Spezialanweisung für Tiemann/Coudé-Katheter mit leicht gebogener Spitze.

Bei der Verwendung eines Tiemann/Coudé-Katheter ist eine spezielle Technik erforderlich. Eine entsprechende Einweisung und Hinweise zur Anwendung erhalten Sie von Ihrem medizinischen Fachpersonal.

1. Achten Sie vor dem Einführen des Katheters darauf, dass die Markierung am Konus die Richtung der Krümmung der Katheterspitze anzeigt. Dies ist eine Orientierungshilfe, um sicherzustellen, dass die gebogene Spitze während des Gebrauchs in die richtige Richtung zeigt.
2. Die gebogene Spitze sollte während der gesamten Katheterisierung, einschließlich des Herausziehens, in Richtung Bauch zeigen. Oder befolgen Sie die Anweisungen, die Sie vom medizinischen Fachpersonal erhalten haben.

Tiemann/Coudé



Bei Wellspect entwickeln wir innovative Kontinenzlösungen, die das Leben der Menschen verändern. Wir möchten unsere Anwender dazu inspirieren, Selbstvertrauen und Unabhängigkeit sowie Gesundheit und Wohlbefinden zu entwickeln. Mit unseren Marken LoFric® und Navina™ sind wir seit über 30 Jahren branchenführend. Wir entwickeln zuverlässige und benutzerfreundliche Produkte für das Blasen- und Darmmanagement mit möglichst geringer Umweltbelastung. Wir sind leidenschaftlich bemüht, klimaneutral zu werden und eng mit Anwendern und Angehörigen der Gesundheitsberufe zusammenzuarbeiten, die uns ständig dazu inspirieren, unsere Produkte und Dienstleistungen jetzt und für die Zukunft auf nachhaltige Weise zu verbessern.

Wellspect. Ein echter Unterschied.

Weitere Informationen zu unseren Produkten und unserer Initiative Advancing Continence Care Together (ACCT) finden Sie auf unserer Webseite.

Folgen Sie uns auch auf Facebook und Instagram.

[wellspect.de](https://www.wellspect.de) [wellspect.at](https://www.wellspect.at) [wellspect.ch](https://www.wellspect.ch)

